

機械器具 12 理学診療用器具

一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー (70014000)

プローブフィットワイドタイプ

再使用禁止


【警告】

本品は天然ゴムラテックス製である。
天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。
このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

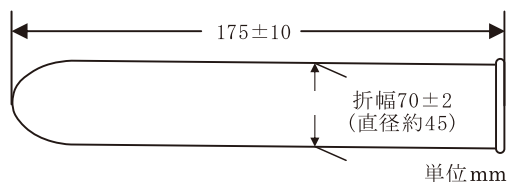

＊ 【使用目的又は効果】

経皮用プローブを使用する時、患者間の感染予防及び医療従事者への感染予防、事後処理の簡略化を目的とする。

＊ 【使用方法等】

経皮用プローブに潤滑剤を塗布した後、本品の巻上りの表裏を確認し、裏側が経皮用プローブ先端にかぶさるようにする。
プローブ先端部にピッタリと密着させてプローブ根元に向かってゆっくりとほぐし、プローブの根元まできちんとかぶせる。
本品に潤滑剤を塗布した後、患者の体表面の測定を開始する。
測定終了後、経皮用プローブから本品を抜き取る。
本品はディスポーザブル製品のため一回限りの使用とする。

【使用上の注意】

潤滑剤、薬品、溶剤、油類等によっては、膨潤したり浸透したりする場合がありますので、確認の上、注意して使用すること。

本品は天然ゴムラテックス製である。

天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こすことがある。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施すこと。

本品はディスポーザブル製品なので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

使用期限を過ぎた本品は使用しないこと。

＊ 【保管方法及び有効期間等】

＊ <保管方法>

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け冷暗所に保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する機器の周辺等に保管しないこと。
- ・揮発性薬品と一緒に保管しないこと。

＊ <有効期間>

使用期限は外装に記載(自己認証)

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: 相模ゴム工業株式会社

住所: 〒243-0002 神奈川県厚木市元町2-1

電話番号: 046-221-2311

(土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

【発売元】

一般社団法人 日本家族計画協会
東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

【販売提携】

サンファーマ株式会社
東京都港区芝公園1-7-6